

Tenez compte de ces conseils importants d'A-dec pendant que vous et votre équipe dentaire vous préparez à rouvrir votre cabinet...



Conseils pour votre salle de soins:

Assurez-vous que vos protocoles et politiques de pratique ont été mis à jour pour se conformer aux ministères et organismes de santé locaux, régionaux et fédéraux.

- Reportez-vous toujours aux instructions d'utilisation du fabricant fournies avec votre équipement et suivez-les. Les conseils recommandés dans ce document concernent uniquement les équipements A-dec.
- Vérifiez que la température de votre cabinet dentaire soit normale, car des fluctuations extrêmes de températures peuvent affecter les performances des équipements.
- Nettoyez et désinfectez tout dans la salle d'opération comme vous le feriez après chaque patient ou pendant votre protocole de nettoyage hebdomadaire. Assurez-vous de nettoyer et de désinfecter tous les contacts et les surfaces de transferts avant de rouvrir votre cabinet.
- Vérifiez les conseils des fabricants concernant la remise en route du compresseur et du système d'aspiration de votre salle mécanique.
- Consultez la liste des contrôles de maintenance de l'équipement A-dec conjointement aux sections de conseils ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires.
- Testez tous vos équipements à travers une gamme complète de mouvements et de fonctionnalités pour assurer leur bon fonctionnement.
- Si quelque chose ne fonctionne pas correctement ou si vous rencontrez des problèmes concernant votre équipement dentaire, contactez votre revendeur agréé A-dec ou appelez le service client Eurotec au 01-48-13-37-38.

[Téléchargez ici les documentations A-dec utiles :](#)



Guide d'asepsie du matériel A-dec

Vous donne des informations concernant de désinfection des équipements A-dec. Pour une liste et des références de produits, contactez votre revendeur agréé A-dec

[Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/0af029_59229b740c99444f932f8b60d3bd4fd3.pdf](https://815ad320-7512-4199-8b64-87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/0af029_59229b740c99444f932f8b60d3bd4fd3.pdf)



Guide de maintenance de la sellerie A-dec

Guide complet sur les soins des selleries des fauteuils dentaires A-dec. Pour une liste et des références de produits, contactez votre revendeur agréé A-dec

[Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/0af029_ea07635143544438a5f0c6e7ebfa6954.pdf](https://815ad320-7512-4199-8b64-87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/0af029_ea07635143544438a5f0c6e7ebfa6954.pdf)



Guide de maintenance préventive A-dec

Liste de contrôle des tâches essentielles d'entretien quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel de l'équipement

[Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/0af029_02c837a17cb44acbb608c77fa88e478e.pdf](https://815ad320-7512-4199-8b64-87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/0af029_02c837a17cb44acbb608c77fa88e478e.pdf)



Local Technique:

A-dec vous recommande d'allumer vos compresseurs et systèmes d'aspiration au moins une semaine avant l'ouverture de votre cabinet. Ces systèmes sont conçus pour fonctionner en continu. L'inactivité peut rendre certains composants plus fragiles.

- Allumez l'aspiration et ouvrez les vannes d'instrumentation de vide dans chaque
- Salle de soins pendant 10–15 minutes
- Suivez votre protocole de nettoyage de votre aspiration pour aider à éliminer les débris qui pourraient s'être déposés dans la tuyauterie.
- Allumez le compresseur et actionnez toutes les positions des instruments dynamiques de chaque salle de soins pour faire circuler l'air dans les tuyaux.
- Faire l'entretien du système de séparation d'amalgame conformément aux instructions du fabricant.
- Contactez votre revendeur agréé A-dec si vous avez des problèmes de performances du système ou s'il est temps de planifier un service de maintenance annuel.



Fauteuil dentaire et éclairage:

- Assurez-vous que le bouton d'alimentation du fauteuil (sur ou près de la plaque de la base) est en position de marche.
- Allumez et éteignez la lumière, et parcourez les différents modes d'éclairage.

[Téléchargez ici les documentations A-dec utiles:](#)



Mode d'emploi du fauteuil

Choisissez votre modèle dans le lien ci-dessous :

Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/377e03_b15fe3c24ea4436aa68e7754bcf46493.pdf



Mode d'emploi de l'éclairage A-dec

Choisissez votre modèle dans le lien ci-dessous :

Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/377e03_254dc2c496f142cab97c286322546bd4.pdf



Tablette porte instruments & Qualité de l'eau:

A-dec vous recommande d'effectuer un traitement de choc sur toutes les conduites d'eau de l'unité dentaire avant de rouvrir votre cabinet.

Nettoyez vos bouteilles soigneusement.



- Appliquez un traitement de choc avec Metasys BR. Contactez votre revendeur agréé A-dec qui dispose du protocole ou bien contactez Eurotec pour de plus amples informations et recommandations. contact@eurotec-dental.fr
- Reprenez l'utilisation quotidienne des comprimés A-dec ICX® et du protocole d'entretien recommandé des circuits d'eau d'A-dec.
- Surveillez régulièrement la qualité de l'eau de votre unité dentaire.
- Suivez tous les contrôles quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels qui se rapportent à votre tablette via la liste de contrôle de maintenance de l'équipement A-dec.

[Téléchargez ici les documentations A-dec utiles:](#)



Mode d'emploi de votre unit dentaire

Choisissez votre modèle :

Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/377e03_2b4a0ddb1e4616856401836a46d211.pdf



Système d'eau propre A-dec

Guide d'utilisation

Guide complet.

Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/377e03_68a01bd9f96d48e0a77cb8549de46c5a.pdf



Protocole de maintenance du système d'eau A-dec

Guide pratique.

Télécharger PDF https://815ad320-7512-4199-8b64-87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/377e03_1dfce22772c647a0b2e6c8baa6c7e147.pdf



Liste de contrôle de maintenance de l'équipement

Liste de contrôle des tâches essentielles d'entretien quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel de l'équipement

Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/0af029_02c837a17cb44acbb608c77fa88e478e.pdf

Instrumentation Assistante :



- Nettoyez vos tuyaux d'aspiration en vous conformant aux recommandations du fabricant de l'aspiration.
- Exécutez le protocole de nettoyage recommandé par A-dec sur tous les évacuateurs à haut volume (HVE), les éjecteurs de salive (SE), les seringues air / eau et les composants du collecteur de solides.
- Testez le fonctionnement de la seringue air / eau. Si vous détectez des fuites d'air / eau ou si le débit d'air / eau ne s'arrête pas immédiatement lorsque vous relâchez les boutons, remplacez et lubrifiez les joints toriques de la seringue et les ensembles valve-bouton.
- Suivez tous les contrôles quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels qui se rapportent à l'instrumentation de l'assistante et aux systèmes de support associés dans la liste de contrôle de maintenance de l'équipement A-dec.

[Téléchargez ici les documentations A-dec utiles:](#)



Instrumentation du pack assistante

Pour retrouver votre modèle cliquez le lien ci-dessous :


Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/377e03_b9b8e0ee6eaa4849acca0f706dd7f08e.pdf



Mode d'emploi de la seringue A-dec

Pour retrouver votre modèle, cliquez sur le lien ci-dessous:

Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/0af029_32b4f0b8ce4a4e6c857a539596bd2164.pdf

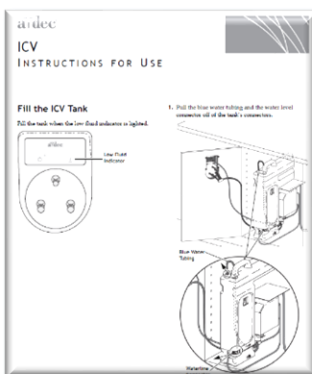

Mode d'emploi du système A-dec de nettoyage de l'aspiration

Guide d'utilisation du ICV.

Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/0af029_33547bf60cb041cd9941135fc071b38b.pdf